

## **Gebrauchs- und Pflegehinweise für orthopädische Maßschuhe**

### **Einsatz und Gebrauch**

Ihre orthopädischen Maßschuhe sind ein Hilfsmittel, das individuell für Sie angefertigt wurde.

Tragen Sie bitte ausschließlich Ihre Maßschuhe, also auch im Haus und während der Freizeit.

Auch Maßschuhe müssen eingelaufen werden. Tragen Sie Ihre Schuhe anfangs daher nur stundenweise und steigern Sie die Tragedauer kontinuierlich.

Bitte untersuchen Sie Ihre Füße täglich auf Rötungen, Druckstellen oder Verletzungen. Sollten diese länger auftreten oder sogar zu Schmerzen führen, benachrichtigen Sie uns bitte.

Achten Sie bitte vor dem Anziehen auf Fremdkörper im Schuh. Vermeiden Sie bitte auch Futter- und Strumpffalten.

Regelmäßige Nachkontrollen der Füße sind sehr wichtig. Lassen Sie sich mindestens zwei Mal im Jahr einen Termin zur Kontrolle Ihrer Füße geben.

Alle Veränderungen an Ihren Füßen erfordern unbedingt die Ansicht von Ihrem Arzt oder Orthopädie-Schuhtechniker.

### **Reinigung und Pflege**

Bitte pflegen Sie Ihre Maßschuhe regelmäßig mit den richtigen Pflegemitteln. Diese Pflegemittel erhalten Sie bei uns.

Alle Reparaturen an Ihren Maßschuhen führen wir in unserer Werkstatt fachgerecht durch.

### **Lebensdauer**

Die Tragedauer Ihrer Schuhe im Sinne des Medizinproduktegesetzes beträgt 2 Jahre, bei Hausschuhen 4 Jahre. Danach haben Sie einen gesetzlichen Anspruch auf ein neues Paar.

### **Regularien**

Orthopädische Maßschuhe sind orthopädische Hilfsmittel in Sinne des Medizinproduktegesetzes (MPG) und entsprechen den Anforderungen der EG-Richtlinie 93/432/EWG Anh. I. bzw. ab 26.05.2020 der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte – Medical Device Regulation (MDR).